


Cadeira de rodas Reclinável

MANUAL DO USUÁRIO



coyote[®]

Estrutura

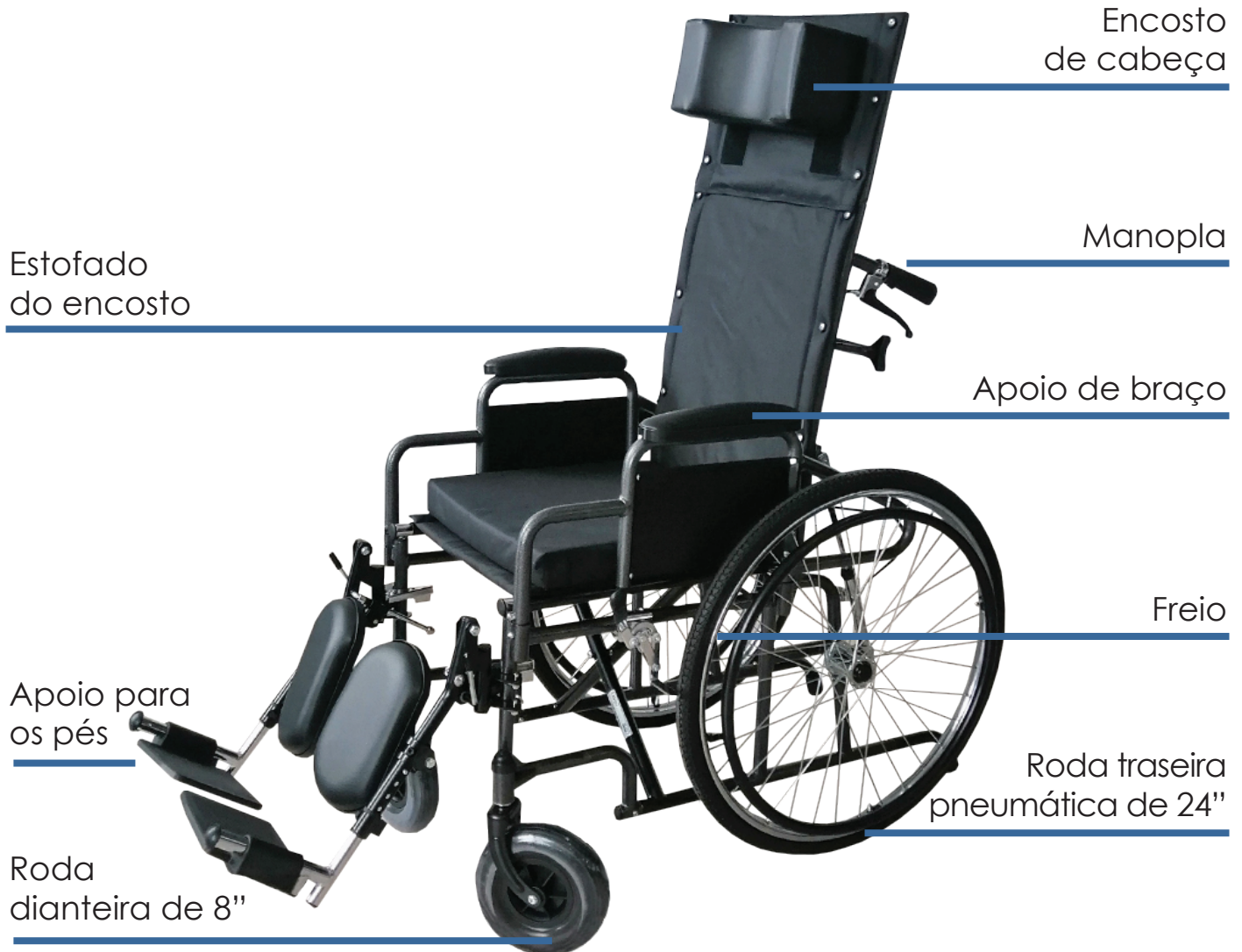

Capacidade: 136 kg
(peso máximo do usuário)

Uso

Desdobrando a cadeira

1. Desdobre a cadeira de rodas inclinando-a para um lado e pressionando as calhas do assento até a abrir completamente.
2. Instale a barra de estabilidade traseira e fixe-a com ambos os botões para evitar que dobre parcialmente.
3. Instale os apoios para os pés.

Dobrando a cadeira

1. Remova os apoios para os pés.
2. Desparafuse o botão na extremidade ranhurada da barra estabilizadora e abaixe-o (ou remova-o completamente).
3. Levante a parte dianteira e traseira do assento ao mesmo tempo com ambas as mãos até que a cadeira esteja completamente dobrada.

Reclinado na cadeira

Para alterar o ângulo de inclinação do encosto da cadeira em qualquer direção, aperte as alavancas manuais, ajuste o ângulo e solte as alavancas para travá-las no local desejado.

Remova os apoios de braços

Para remover os apoios de braços é necessário pressionar os botões e levantá-los uniformemente para removê-los do lugar.

Colocação dos apoios das pernas

1. Posicione os suportes de forma que apontem 90 graus em relação à cadeira reclinável. (Os apoios para os pés devem apontar para a frente quando a cadeira estiver dobrada)
2. Alinhe os orifícios com os pinos do suporte na estrutura e pressione suavemente para baixo até que os suportes possam girar sem esforço.
3. Rode o apoio das pernas até que aponte para dentro. Continue girando até que ele trave no lugar. Você poderá ouvir um “clique” quando chegar a esse ponto.
4. Repita os passos 1 a 3 para fixar o outro apoio de pernas.

Remova os apoios das pernas

1. Solte a trava pressionando a alavanca de montagem frontal.
2. Mova o apoio das pernas de um lado para o outro e puxe-o para fora.

Uso (continuação)

Ajustar o comprimento dos apoios das pernas

NOTA: Ao ajustar os apoios para as pernas, o usuário deve estar sentado na cadeira com ambos os pés posicionados nos apoios para os pés.

1. Pressione o botão de mola no apoio de pernas
2. Levante ou baixe o apoio das pernas até à posição desejada que proporcione o máximo apoio às coxas.
3. Certifique-se de que o botão da mola esteja travado na posição.

NOTA: O apoio das pernas não deve ficar baixo nem causar pressão desconfortável nas coxas ao ajustar-se à cadeira.

Elevar apoios para as pernas

1. Eleve o apoio para os pés do conjunto do apoio para as pernas até a posição desejada.
2. Solte o conjunto do apoio das pernas e ele travará automaticamente no lugar.
3. Para abaixar, empurre a alavanca do apoio para as pernas e abaixe o apoio para os pés até a posição desejada.

Bloqueio de roda

Acione ambos os freios antes de subir ou descer da cadeira, inclinar-se para a frente ou enquanto estiver em um elevador ou rampa para cadeiras de rodas. As alavancas de freio são acionadas posicionando-as completamente para frente.

Instale anti-tombamento

1. Insira as almofadas antiderrapantes com as rodas voltadas para o chão até que travem no lugar.
2. Pressione os botões de liberação na parte inferior do antitombo e deslize-o para cima ou para baixo para obter uma distância adequada ao solo.
3. Certifique-se de que ambos os antitombos estejam configurados com a mesma configuração e que os botões de liberação estejam totalmente ativados antes do uso.

ATENÇÃO! Qualquer ajuste na sede do seu produto pode afetar sua estabilidade. Recomendamos vivamente que solicite ao seu revendedor ou a um técnico qualificado que ajuste a altura da sua cadeira para garantir ajustes seguros.

Segurança

Estabilidade

A cadeira de rodas foi projetada para ser segura e estável, desde que o centro de gravidade seja mantido durante as atividades normais. Deve-se ter cuidado ao realizar atividades que desloquem seu centro de gravidade sobre a cadeira. Nunca chegue tão longe para alcançar algo que você precise deslocar sobre o assento ou inclinar-se para fora da cadeira. Se você precisar alcançar objetos que exijam inclinação, certifique-se de que as rodas dianteiras estejam apontadas para frente, de modo que estendam a base da roda maior e estabilizem a cadeira.

Rampas

Certifique-se de suas próprias capacidades, limitações e força antes de tentar subir uma rampa. A técnica correta para deslizar em rampa deve ser ensinada por profissional habilitado. Se você precisar parar em uma posição inclinada, evite movimentos bruscos e bruscos ao voltar a se mover. Uma angulação da cadeira para trás ou um movimento repentino e abrupto pode causar instabilidade. A tentativa de usar os freios de travamento das rodas pode resultar em frenagem repentina com travamento acidental, fazendo com

que a cadeira se incline para um lado. Evite mudar de direção ao descer uma ladeira, pois isso pode causar instabilidade ou até capotamento. Nunca use sua cadeira de rodas Coyote em uma inclinação superior a 4,8°.

Cuidados com a cadeira

Certifique-se sempre de que sua cadeira fique seca após o uso para evitar corrosão. Deve ser lavado regularmente com água morna e detergente neutro. Seque depois de lavá-lo. Entre o uso, pode ser dobrado para armazenamento.

Garantia

A cadeira de rodas Coyote tem 12 meses de garantia do quadro. Em casos de defeitos deste gênero, o componente será substituído sem custo. Entre em contato com o revendedor autorizado Loh Medical para solicitar a garantia.

Para mais informações acesse:
brasil.lohmedical.com/contato/formulario

Esta cadeira de rodas foi testada e certificada de acordo com os requisitos CE, BSEN 12183 e Normas ABNT NBR ISO 7176-1 :2018, 7176-3 :2015, 7176-7 :2009, 7176-8 :2009, 7176-15 :2009.

Fabricante Legal:

LOH ENTERPRISES, LLC
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
318 Davis St., Clarks Summit PA 18411
Estados Unidos

Importado por:

Loh Enterprises Importação,
Exportação, Comércio e Serviços
LTDA.

Rua Francisco Marengo,
1376 - Tatuapé- SP

Responsável Técnico:
Leticia Augusta Teodoro Silvestri

Registro ANVISA/MS: 80881989009.

Numero de Série:

Contato para SAC:
infobrasil@lohmedical.com