



## Uso

- El cochecito EIO proporciona apoyo de posicionamiento leve a moderado para niños con necesidades especiales. Ofrece las características típicas de un cochecito ligero, incluidas varias opciones de ajuste, accesorios, un mecanismo de freno y la capacidad de plegarse para facilitar el transporte.

## Entorno de uso

- El cochecito EIO está diseñado para uso en interiores y exteriores, en el hogar y la comunidad. Si se usa bajo la lluvia, limpie el exceso de agua con un paño suave. Si la silla se salpica con lodo o sustancias corrosivas como sal para carreteras, la silla debe lavarse con agua, secarse con un paño y un lubricante hipoalergénico y biodegradable vuelto a aplicar a las partes móviles. Se debe evitar el contacto con el agua de mar, ya que corroerá las áreas que no se pueden lavar. Al pasar del exterior al interior, limpie el exceso de suciedad o barro de las ruedas para evitar que se ensucie el ambiente interior.
- Recuerde NUNCA usar WD-40 o lubricantes a base de silicona en el cochecito EIO.
-  Advertencia: Evite la exposición prolongada al calor o al frío extremos, incluidas las saunas. Siempre verifique la temperatura de la silla antes de usarla.

## Contenido

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uso</b> .....                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>Entorno de uso</b> .....                                                       | <b>2</b>  |
| <b>Información general y seguridad</b> .....                                      | <b>3</b>  |
| <b>Mantenimiento</b> .....                                                        | <b>4</b>  |
| <b>Limpieza</b> .....                                                             | <b>5</b>  |
| <b>Piezas incluidas</b> .....                                                     | <b>5</b>  |
| <b>Accesorios Opcionales</b> .....                                                | <b>5</b>  |
| <b>Dimensiones y tabla de tallas</b> .....                                        | <b>6</b>  |
| <b>Ensamblaje y ajuste</b> .....                                                  | <b>7</b>  |
| 1. Marco.....                                                                     | 7         |
| 2. Eje trasero.....                                                               | 7         |
| 3. Ruedas traseras .....                                                          | 7         |
| 4. Ruedas delanteras .....                                                        | 7         |
| 5. Reposapiés.....                                                                | 7         |
| 6. Tela del asiento .....                                                         | 8         |
| 7. Toldo .....                                                                    | 9         |
| 8. Laterales acolchados (x4) .....                                                | 10        |
| 9. Funcionamiento del cinturón de seguridad/amés de hombros/bloqueo de pies ..... | 10        |
| 11. Freno de estacionamiento .....                                                | 11        |
| 12. Correa de reclinación .....                                                   | 11        |
| 13. Ángulo del espacio para los pies .....                                        | 11        |
| 14. Bloqueos giratorios de ruedas delanteras .....                                | 11        |
| <b>Plegado</b> .....                                                              | <b>12</b> |
| <b>Levantamiento</b> .....                                                        | <b>13</b> |
| <b>Garantía limitada</b> .....                                                    | <b>14</b> |



**ADVERTENCIA: EVITE LESIONES GRAVES POR CAÍDA O DESLIZÁNDOSE. USE SIEMPRE EL ARNÉS DEL ASIENTO. NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO. REFERENCIA. LA SEGURIDAD DE UN NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD. ES ADECUADA SOLO PARA UN NIÑO.**

- Siga todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual de usuario para futuras consultas. El uso incorrecto puede causar lesiones o daños a la silla de paseo.
- Los niños deben estar sujetos en todo momento y nunca deben dejarse desatendidos.
- El arnés no reemplaza la supervisión adecuada de un adulto.
- **IMPORTANTE: es importante para la seguridad de su hijo que el arnés esté correctamente equipado y ajustado. La estabilidad de la silla de paseo puede verse comprometida si el arnés de seguridad no está ajustado correctamente de acuerdo con estas instrucciones.**
- Mantenga al niño alejado de cualquier pieza móvil mientras realiza los ajustes.
- **IMPORTANTE - PELIGRO: Asegúrese de que los niños no se acerquen al cochecito al plegar o desplegar. Los puntos de pellizco y las acciones de tijera son inevitables durante estas operaciones.**
- No lleve niños, artículos o accesorios adicionales en o sobre la silla de paseo, excepto según lo permitido en este manual. Pueden hacer que la silla de paseo se vuelva inestable o ejerza una tensión innecesaria en la silla de paseo que podría provocar daños.
- Sobrecarga de más de 40 kg (90 lb), plegado incorrecto o uso de accesorios, asientos para niños, ganchos para bolsos, fundas para la lluvia, patinetes para cochecitos, etc., que no sean los aprobados por el fabricante puede dañar la silla de paseo.
- **Nunca deje al niño en la silla de paseo cuando suba o baje escaleras o escaleras mecánicas o cuando viaje en otras formas de transporte.**
- Trate los bordillos y los terrenos accidentados con cuidado. El impacto repetido puede causar daños a la silla de paseo.
- Nunca permita que los niños se paren en el reposapiés. • No coloque artículos en la parte superior de la capota ya que pueden dañar la capota.
- La EIO siempre debe plegarse y desplegarse con facilidad. No forzar.
- **APLICAR SIEMPRE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO CUANDO EL COCHECITO ESTÉ DETENIDO.**
- Mantener alejado de llamas abiertas.\*
- **El asistente debe usar la correa de sujeción para la mano (incluida) en todo**

\* La resistencia a la ignición de las partes tapizadas cumple con BS-EN 1021-1 y -2

## Mantenimiento

Este cochecito requiere un mantenimiento regular por parte del usuario. Antes de cada uso, compruebe todos los remaches y dispositivos de conexión para la estanqueidad. Inspeccione los frenos, las ruedas y los neumáticos y reemplácelos o repárelos si es necesario. Compruebe todos los dispositivos de seguridad para su correcto funcionamiento. Suspenda **inmediatamente** el uso de la silla de paseo si no está estructuralmente en buenas condiciones.

Los ejes y las piezas móviles deben limpiarse **semanalmente** con un paño húmedo para eliminar el polvo, la suciedad y el barro. Aplique con moderación un spray de teflón de alta calidad después de cada limpieza. **NO UTILICE WD-40**, aerosoles de silicona u otros aerosoles lubricantes que atraigan el polvo y la suciedad.

Repáre o reemplace cualquier pieza suelta, desgastada, doblada, faltante o dañada antes de usar la silla de paseo. Solo se deben utilizar piezas de repuesto del fabricante. Puede que no sea seguro utilizar piezas no suministradas por el fabricante.

| Comprobaciones de mantenimiento                                   | Cada Semana | Cada 3 meses | Cada 6 meses | Según sea necesario |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| Llantas y neumáticos                                              | •           |              |              |                     |
| Bloqueos de ruedas                                                | •           |              |              |                     |
| Accesorios                                                        | •           |              |              |                     |
| Ejes de ruedas delanteras y traseras                              | •           |              |              |                     |
| Limpiar/lubricar las piezas móviles <sup>1</sup>                  | •           |              |              |                     |
| Cinturones, cremalleras y velcro cierres                          |             | •            |              |                     |
| Tapicería de asiento/respaldo <sup>2</sup> y tirantez             |             | •            |              |                     |
| Reposabrazos y espuma                                             |             |              | •            |                     |
| Marco                                                             |             |              | •            |                     |
| Contactar al distribuidor para servicio o reparación <sup>3</sup> |             |              |              | •                   |


<sup>1</sup> Nota: NO use WD-40 o aerosol a base de silicona como lubricante.

<sup>2</sup> Siga las instrucciones de limpieza para una higiene adecuada del usuario.

<sup>3</sup> Nota: La reparación o el reemplazo de piezas no extraíbles, desgastadas o rotas debe realizarlas un centro de servicio calificado.

## Limpeza

- Limpie el marco con un paño húmedo y un detergente suave y séquelo bien.
- El dosel puede limpiarse ligeramente con una esponja usando un paño húmedo y un detergente suave. La tela del asiento, el cojín para la cabeza, las almohadillas laterales y las almohadillas del arnés se pueden lavar. Secar al aire completamente antes de reutilizar. El arnés gris puede colocarse en una bolsa de malla y lavarse a máquina solo en ciclo suave.
- No doble ni almacene el producto mientras esté húmedo y nunca lo guarde en un ambiente húmedo; esto puede causar la formación de moho.
- La tela del asiento EIO se puede mecanizarlavado en ciclo suave en agua fría con undetergente suave. Para minimizar la contracción, simplemente vuelva a colocar la tela del asiento en el marco para secar. (NO ponga la tela del asiento en la secadora).
- Asegúrese de abrir la cremallera y quitar

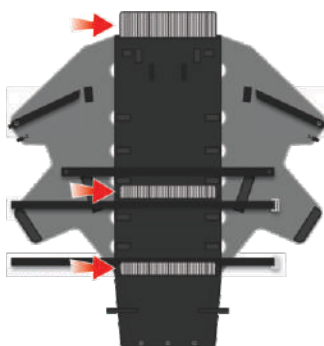

## Piezas incluidas



EJE TRASERO



REPOSAPIÉS



RUEDAS  
DELANTERAS



RUEDAS  
TRASERAS



CAPOTA



LATERALES



ASIENTO  
DE TELA



MARCO &  
BOLSILLO



BLOQUEO DE PIE



ASISTENTE



**NOTA:** ESTA PARTE ES SOLO MATERIAL DE EMBALAJE

## Accesorios opcionales



Cubierta de lluvia EIO



Soft-Touch Sitter



Soft-Touch Liners

## Tabla de dimensiones y tallas

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Altura del usuario objetivo (aprox.)                                  | 30 - 50" (76.5 - 127 cm)             |
| Ancho del asiento                                                     | 14" (35.5 cm)                        |
| Ancho del asiento: almohadillas en la mayoría de los puntos estrechos | 9" (22.9 cm)                         |
| Profundidad del asiento                                               | 12" (30.5 cm)                        |
| Altura del respaldo del asiento                                       | 24" (61 cm)                          |
| Del asiento al espacio para los pies<br>Solo cochecito                | 13" (33 cm)                          |
| Del asiento al espacio para los pies: con<br>Liners de tamaño 1 o 2   | 15" (38 cm)                          |
| Del asiento al espacio para los pies<br>con tamaño 1 Sitter           | 16" (40.6 cm)                        |
| Del asiento al espacio para los pies<br>con asiento tamaño 2          | 17" (43 cm)                          |
| Altura del piso al asiento                                            | 20" (50.8 cm)                        |
| Altura del piso al asiento (respaldo)                                 | 16" (40.6 cm)                        |
| Altura del mango al suelo                                             | 30" - 42" (76 - 106.7 cm)            |
| Capacidad máxima de peso                                              | 90 lbs (40 kg)                       |
| Peso de la silla                                                      | 22 lbs (10 kg)                       |
| Niveles de altura del arnés de hombros                                | 9" 11" 13.5" 16"                     |
| Rango de inclinación del asiento<br>(desde la posición vertical)      | 25° - 75 °                           |
| Dimensiones generales (ancho x largo x alto)                          | 24" x 46" x 45" (61 x 117 x 114 cm)  |
| Dimensiones plegado (ancho x largo x alto)                            | 24" x 43 " x 20" (61 x 109 x 51 cm)  |
| Dimensiones plegado sin ruedas traseras<br>(ancho x largo x alto)     | 22" x 37 " x 20" (55.9 x 94 x 51 cm) |
| Diámetro de la rueda (delantera y trasera)                            | 9" & 11 " (22.9 x 27.9 cm)           |
| Número de serie                                                       | 00896688001855                       |


# Montaje y ajuste

## 1. MARCO

Abra el marco en posición vertical.

Cuando el bloqueo primario y secundario está activado, se escuchará un CLIC.

**NOTA:** Los insertos rígidos se pueden quitar del bolsillo de compras

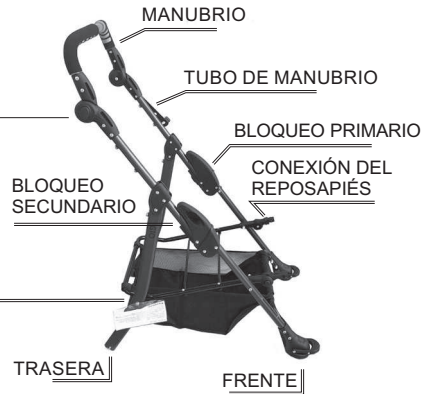

## 2. EJE TRASERO

Empuje las patas del bastidor trasero en el eje trasero.

Cuando el bloqueo está activado, se escuchará un CLIC.



## 3. RUEDAS TRASERAS

Empuje la rueda trasera sobre el eje trasero (lados derecho e izquierdo).

Cuando la rueda esté colocada, se escuchará un CLIC.



## 4. RUEDAS DELANTERAS

Empuje la rueda delantera hacia arriba en la pata del marco delantero (derecha e izquierda).lados).

Cuando se coloca la rueda delantera, se escuchará un CLIC.



## 5. REPOSAPIÉS

Oriente el reposapiés de modo que quede hacia arriba. Empuje a la derecha y a la izquierda los tubos del reposapiés en el marco al mismo tiempo.

Cuando el bloqueo está activado, se escuchará un CLIC.



**Nota:** ¡Visite nuestro canal de YouTube para ver videos instructivos e informativos!

## 6. TELA DEL ASIENTO

Doble botón en el tubo del mango (lados derecho e izquierdo).

Cuando el botón está activado, se escuchará un SNAP.



### 6A. TELA DEL ASIENTO

Correas de soporte con botones en cada pata trasera.

Cuando el botón está activado se escuchará un SNAP.



### 6B. CORREAS BAJO EL MARCO DEL ASIENTO (x2)


CORREA DELANTERA  
(encima del tornillo, debajo  
ajuste del espacio para los pies)

CORREA TRASERA



### 6C. IMPORTANTE: ANILLOS EN D DE LA CORREA DEL ASIENTO

Pase hacia arriba por la parte inferior, luego hacia abajo por la parte superior.

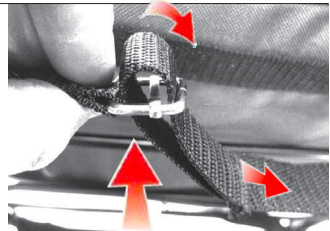

### 6D. ANILLOS EN D DE LA CORREA DEBAJO DEL ASIENTO

La cola suelta de la correa debajo del asiento debe colocarse entre la correa enseñada y la parte inferior del asiento.

NO apriete demasiado.





#### 6E. BROCHES PARA LOS PIES (×2)

Abotone la tela del espacio para los pies a los broches de presión del espacio para los pies.

Cuando el botón está activado, se escuchará un SNAP.



#### 6F. VELCRO PARA LOS PIES (×2)

Envuelva el marco del espacio para los pies con velcro y fíjelo (lados derecho e izquierdo).



#### 6G. BOLSILLOS LATERALES

Dobla las cerraduras del marco principal y velcro hacia abajo (lados derecho e izquierdo).




### 7. CAPOTA

- A** Deslice el clip de la capota hacia abajo en el conector del marco (lados derecho e izquierdo). No forzar. Asegúrese que el seguro está libre de obstrucciones de la tela.

Cuando el bloqueo está activado, se escuchará un CLIC.

- B** Para quitar la capota, presione el clip hacia abajo y luego deslícelo hacia arriba.

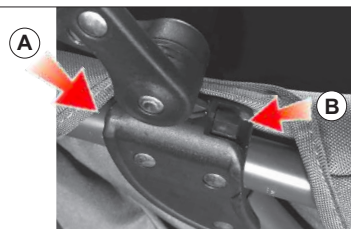

#### CREMALLERA Y BROCHE DE CAPOTA

Abroche los broches de estabilización y cierre la capota (lados derecho e izquierdo). La cremallera y el broche deben colocarse justo debajo del botón de ajuste

NOTA: Puede quitar la mitad trasera de la capota desabrochando la costura central.




## 8. LATERALES ACOLCHADOS (x4)

Pase ambas correas de velcro a través de las ranuras ubicadas en los bordes de la superficie del asiento y del respaldo.

Tire de las correas de velcro a través del asiento (o atrás). Luego envuelva y sujete.

Repita para todas las correas.

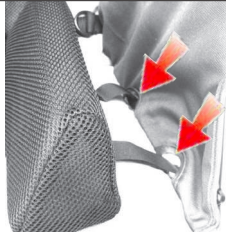

## CORREA DE SUJECIÓN PARA ASISTENTE

Fije la correa de sujeción al manillar.

**Asegúrese de que la muñequera de seguridad esté bien colocada.**





## 9. FUNCIONAMIENTO DEL ARNÉS PÉLVICO/ARNÉS PARA LOS HOMBROS/BLOQUEO PARA LOS PIES

**⚠ ADVERTENCIA:** Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Utilice siempre la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón y las correas de los hombros.


### 9.A CORREAS DE LOS HOMBROS AJUSTABLES EN ALTURA

Desenganche el clip de la almohadilla para el pecho y luego baje las correas a través de bucles del respaldo para ajustar la correa del hombro. Vuelva a conectar el clip de la almohadilla para el pecho.

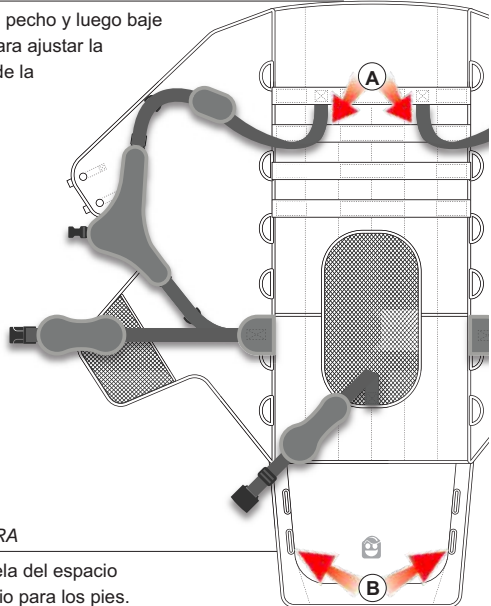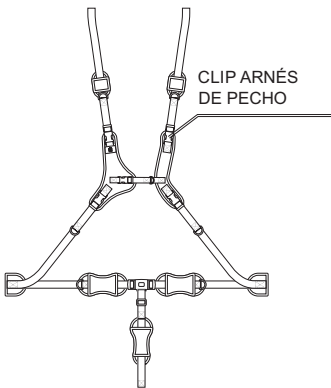

### 9.B BLOQUE DE PIE AJUSTABLE EN ALTURA

Pase las correas a través de las ranuras de tela del espacio para los pies y alrededor del marco del espacio para los pies. Sujete los clips alrededor de la parte trasera y apriete.

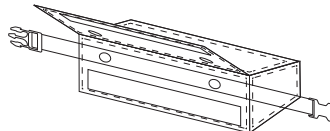

Ver instalado en la página siguiente.

### 9.B BLOQUE DE PIE AJUSTABLE EN ALTURA (cont.)

Se muestra el bloque de pie instalado.

**NOTA:** El bloque se puede ajustar más alto o más bajo.

Pase la correa alrededor del exterior del marco.



### 11. FRENO DE MANO

Usando el pie, empuje hacia arriba para desactivar el freno y presione hacia abajo para activarlo.



### 12. CORREA DE RECLINACIÓN

Presione el botón en la hebilla y deslice hacia arriba o hacia abajo para ajustar la inclinación.



### 13. ÁNGULO DEL ESPACIO PARA LOS PIES

Para ajustar el ángulo del espacio para los pies, presione el botón de bloqueo de ángulo en ambos lados simultáneamente.

Cuando el bloqueo está activado, se escuchará un CLIC.



### 14. BLOQUEO GIRATORIO DE LA RUEDA DELANTERA

Para activar los bloqueos giratorios de las ruedas delanteras, presione la pestaña hacia abajo. Para permitir que las ruedas delanteras giren libremente, tire la pestaña arriba. Repita en ambos lados.

Cuando el bloqueo está activado, se escuchará un CLIC.

**NOTA:** Para que se active el bloqueo, las ruedas delanteras deben estar mirando hacia adelante.



## Plegado

**⚠ Advertencia:** Las piezas móviles presentan riesgo de aplastamiento. El cochecito siempre debe plegarse y desplegar fácilmente. No forzar.


- (A)** Respaldo de silla de paseo totalmente reclinable.
- (B)** Desenganche el capó de la capota trasera del asiento trasero.
- (C)** Coloque el mango en posición vertical.
- (D)** Desbloquee las ruedas giratorias delanteras (ambos lados hacia adelante).
- (E)** De pie detrás del cochecito, afloje el bloqueo de seguridad en el lado derecho del cochecito y luego tire hacia arriba para liberar el marco.



- (F)** Los bloqueos del marco se desactivarán.
- (G)** Empuje hacia abajo el asa de la EIO.



- (H)** Enganche el clip de cierre.

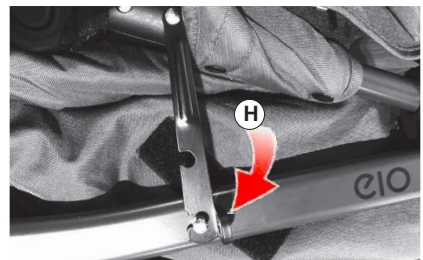

## Levantamiento

**⚠ Advertencia:** Nunca levante el cochecito con el usuario en ella.

Para levantarlo, sujete firmemente el marco del tubo delantero por encima de la envoltura de tela acolchada en ambos lados de la EIO.



## Garantía limitada

---

Se garantiza que la EIO estará libre de defectos de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra, siempre que se utilice de conformidad con estas instrucciones. Esta "Garantía limitada" se extiende únicamente al comprador minorista original y solo es válida cuando se entrega con el comprobante de compra. Conserve el comprobante de compra con esta Garantía limitada.

Si necesita una reparación, comuníquese con el distribuidor donde compró el producto.

### **Tenga en cuenta que la Garantía limitada no se aplicará si:**

- Una falla es causada por un mal uso o un mantenimiento deficiente.
- Las reparaciones son realizadas por un tercero.
- El cochecito está defectuoso debido al desgaste general resultante del uso diario.
- El cochecito está dañado como resultado de un accidente.
- El fabricante no está satisfecho con el cumplimiento de los términos y condiciones de la garantía establecidos.



318 Davis Street, Ste 1, Clarks Summit,  
PA 18411, USA  
[info@lohmedical.com](mailto:info@lohmedical.com)  
[www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

La información contenida aquí  
está sujeta a cambios sin notificación.