

¡VÁMONOS!

Arranca despacio. Recomendamos ruedas antivuelco con el uso del R90.

Antes de empezar, asegúrate de que el mando esté conectado.



Pulsa una vez para bajar la rueda. Cuando oigas una señal acústica desde el R90, la rueda estará completamente bajada.



Pulsa para poner en marcha el R90 y aumentar la velocidad. Pulsa el botón en incrementos de 0,5 segundos para seguir aumentando la velocidad. No aumentarás la velocidad manteniendo pulsado el botón ni pulsándolo más rápido.

SUGERENCIA

Puedes propulsar la silla manualmente hasta la velocidad deseada y, a continuación, pulsar el botón + una sola vez para mantener esa velocidad.



Pulsa para reducir la velocidad.



Pulsa para detener la asistencia del R90.

MANIOBRAS

La posición del R90 directamente debajo de la silla te permite maniobrar y girar dentro del rango de giro propio de la silla.

Utiliza el R90 para acelerar hasta alcanzar una velocidad cómoda. A continuación, practica los giros aplicando presión en uno de los aros de empuje o en el otro. Practica esto en ambas direcciones y a diferentes velocidades.

SUGERENCIA

El R90 detectará un giro cerrado y reducirá en consecuencia la velocidad. El perfil de conducción en interiores es más sensible a esto que el perfil de conducción en exteriores.



CUESTAS Y RAMPAS

Arranca despacio. Recomendamos ruedas antivuelco con el uso del R90.

Busca una pendiente moderada y sin curvas para practicar.

SUBIDAS

Comenzando al menos a 3 metros de la base de la pendiente, pon en marcha el R90 y coje impulso a medida que te acercas.

Al comenzar la subida, el R90 aumenta automáticamente la potencia del motor para ayudarte a impulsarte hacia la parte superior de la pendiente. (Si desplazas el torso hacia delante mejorará la sensación de conducción y la estabilidad).



BAJADAS

Si bajas una pendiente, el R90 detendrá la potencia al motor. El R90 no dispone de mecanismo de frenado. Tú deberás realizar el frenado y el control de la velocidad.

SUGERENCIA

Cuando llegues a la parte inferior de la pendiente, desplázate por inercia hasta la velocidad deseada y, a continuación, pulsa el botón + una sola vez para mantener dicha velocidad.



⚠️ ADVERTENCIA

El uso de un dispositivo de ayuda eléctrica puede cambiar el centro de gravedad o la forma en que se desplace tu silla. Para reducir cualquier riesgo de vuelco o caída, consulta al distribuidor autorizado donde adquiriste el R90 sobre la configuración adecuada de la silla de ruedas, incluido el uso de ruedas antivuelco y cualquier otro ajuste necesario.

DA POTENCIA A TU VIDA



Escanea para ver el vídeo con instrucciones



Escanea para ver este documento en español, francés, alemán, italiano u holandés.

Escanea para ver este documento en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadra qui per vedere il documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het NEDERLANDS te bekijken.

EN SUNRISE MEDICAL NOS PREOCUPAMOS POR SU SEGURIDAD.

Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de funcionamiento seguro y pautas de mantenimiento.

800.333.4000 www.SunriseMedical.com/Empulse



¡VAMOS ALLÁ! GUÍA

Esta guía te ayudará a empezar a disfrutar del R90. Consulta el manual para obtener instrucciones más detalladas y la guía de instalación.



COLOCA LA ABRAZADERA RECEPTORA*

Ajusta la abrazadera al tubo del eje sin apretar. Debe quedar ajustada pero aun así poder moverse o girarse en el tubo.

SUGERENCIA Da la vuelta a la silla para acceder más fácilmente al tubo del eje.

CENTRA LA ABRAZADERA RECEPTORA

Utiliza una cinta métrica para ubicar el centro del tubo del eje. Coloca la abrazadera receptora de modo que quede la misma distancia entre la abrazadera y cada rueda.


SUGERENCIA Para centrar y nivelar rápidamente la abrazadera receptora en las sillas rígidas QUICKIE®, alinea el orificio del centro del tubo del eje con el orificio del centro de la abrazadera receptora del R90. Introduce una pequeña llave Allen (o similar) en los orificios para alinearla fácilmente.

NIVELA LA ABRAZADERA RECEPTORA

Mientras estás sentado en la silla, pide a alguien que ajuste la abrazadera para que quede nivelada. Los 6 tornillos deben apretarse a una torsión de 7,8 Nm para asegurar la abrazadera.

* PARA SILLAS PLEGABLES: consulte el manual para obtener instrucciones sobre la instalación del tubo desmontable.

* Dependiendo del tamaño del tubo, puede incluirse un espaciador para obtener un mejor ajuste de la abrazadera.

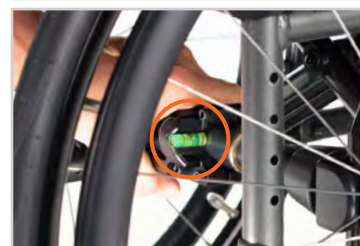

TORQUE!
5,8 pies-libra
7,8 Nm

COLOCA LA RUEDA EN POSICIÓN ELEVADA

Con la rueda elevada, desliza el R90 en la abrazadera receptora. El sistema V-lock™ bloqueará el R90 en su sitio.

Desliza el medidor de altura de rueda incluido por debajo de la rueda. La altura de la rueda no debe ser superior al lado ancho del calibrador etiquetado con "NO GO" (9,5 mm, 3/8") ni inferior al lado fino del calibrador etiquetado con "GO" (6,4 mm, 1/4").

AJUSTE EN ALTURA DE LA RUEDA

Afloja ligeramente las dos piezas de fijación del actuador (A) en la parte posterior del R90 utilizando una llave Allen de 4 mm. A continuación, ajusta la altura de la rueda utilizando el tornillo de ajuste manual de la altura (B). Coloca la rueda de modo que descansa entre las alturas "GO" y "NO GO" del calibrador de altura. Vuelve a ajustar los dos tornillos del actuador a 12 Nm.

SUGERENCIA Introduce primero la llave Allen en el ajuste manual en altura y, a continuación, coloca el R90 en la silla.

NOTA: Si la llave Allen interfiere con el acople del R90 a la silla, no fuerces la conexión, ya que podrías dañar el ajuste en altura.

VERIFICACIÓN: Sentado en la silla, pide a alguien que utilice el botón de encendido para subir y bajar la rueda. La rueda debe hacer contacto con el suelo en la posición más baja y tener entre 6,4 y 9,5 mm de distancia al suelo cuando la rueda está levantada.



DESCARGA LA APLICACIÓN SUNRISE INTELLIGENCE™

Asegúrate de que el Bluetooth de tu móvil esté activado. Abre la aplicación SI y toca "Conectar".

Selecciona tu R90. Completa las ventanas emergentes aceptando el contrato legal de Sunrise Medical.

Introduce tu peso corporal y calibra el R90 a tu silla.

SUGERENCIA Introducir el peso exacto optimiza el rendimiento y los parámetros de conducción del R90. Siempre podrás ajustarlo a través de la configuración de la aplicación.



Puedes descargar la aplicación Sunrise Intelligence™ desde aquí:



CONECTA EL MANDO

Con la batería instalada en el R90, pulsa el botón STOP para iniciar el proceso de conexión.

El R90 y el mando se buscarán automáticamente. Esto se indica en el mando mediante la alternancia de flechas LED.

Cuando las luces LED parpadeen 3 veces, el mando y el R90 estarán conectados.

