

Silla para ducha

Silla para ducha con estructura de aluminio de altura ajustable y respaldo. Fabricada con tubos de aluminio y material de PVC de alta calidad. El asiento y el respaldo cuentan con una abertura en forma de "U" para facilitar la higiene y brindar mayor comodidad al usuario.



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de peso máximo: 100 kg.
- Ancho del asiento: 19.5 pulgadas (49.5 cm).
- Profundidad del asiento: 12 pulgadas (30.4 cm).
- Altura del respaldo: 30 pulgadas (76.2 cm).
- Altura del piso al asiento: Ajustable de 14 a 17 pulgadas (35.5 a 43.1 cm).
- Materiales principales: Asiento y respaldo de plástico moldeado por soplado, tubos de estructura (asiento y respaldo), perillas triangulares y juntas de acero inoxidable.
- Vida útil de seguridad: 2 años a partir de la fecha de uso.



FORMA DE USO

1. Antes de cada uso, verifique que todos los tornillos y perillas estén bien apretados y que las gomas de las patas no estén desgastadas.
2. Si necesita modificar la altura del asiento, asegúrese de que el botón de resorte encaje completamente en el orificio hasta escuchar un "clic".
3. Coloque la silla únicamente sobre un suelo plano y nivelado dentro de la ducha para garantizar su estabilidad y evitar accidentes.
4. Siéntese con cuidado, recordando que el peso máximo soportado es de 100 kg.
5. Mantenga la silla alejada de temperaturas extremadamente altas o bajas para evitar que el plástico y la goma se deterioren.
6. Reemplace las gomas antideslizantes de las patas cada 6 meses, o antes si nota que están gastadas (solo debe tirar de la goma vieja y encajar la nueva).

Para más información sobre cómo obtener este producto

Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

